

Antibac Overfladedesinfektion 75%

Hygiejnisk og brugervenlig overfladedesinfektion

Antibac overfladedesinfektion er udviklet til hurtig og effektiv desinfektion af overflader, inventar, udstyr og små kontaktpunkter. Produktet virker hurtigt og effektivt mod vegetative bakterier, mykobakterier, svampe og forskellige vira. Anvendes på rene overflader, der tåler alkohol. Test på et lille ikke synligt område, hvis du er i tvivl.

Produktet fås i tre forpakningstyper: 750 ml spray, 1000 ml flaske samt en bøtte med 150 stk. blå vådservietter. Spraypumpen har en kraftig doseringsevne uden at danne aerosoler.

Produktfakta:

- Overfladedesinfektion til professionelt brug indenfor sundheds- og fødevarersektoren
- Fødevarereguleret under Journal nr.: 2006-20-5409-00726
- CEI-vurderet
- Opfylder EN1276 og EN1650
- Denatureret i henhold til gældende regler
- Kræver ingen efterbehandling
- Brugervenlig og hygiejnisk emballage, som forhindrer fordampning



Anvendelse:

Overfladedesinfektion til desinfektion af tørre og rengjorte overflader, inventar, udstyr og små kontaktpunkter, som tåler alkohol.

Dosering: Overfladen fugtes og bearbejdes, så den er fugtig i 1 minut. Sørg for at hele overfladen er dækket med desinfektionsvæske. Hvis fordampning sker hurtigere, gentages proceduren.

Bøtte med 150 stk. vådservietter: Vrid låget og tag det af. Lav et hul i midten af folien, tag servietten op gennem hullet og før den gennem hullet i låget. Sæt låget på og træk servietten op. Sørg for at låget er lukket korrekt efter brug, så servietterne ikke tørrer ud.

Produktet findes i:

	Varenr.	Forpakning
Antibac Overfladedesinfektion 75%, 750 ml spray	601375	6 stk. / karton
Antibac Overfladedesinfektion 75%, 1000 ml flaske	601374	12 stk. / karton
Antibac Overfladedesinfektion 75%, 150 stk. vådservietter	601376	6 stk. / karton
Væggholder til Antibac Overfladedesinfektion 75%, 150 stk.	601130	1 stk. / karton

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkning og produktoplysninger før anvendelse. Kontakt os for yderligere information.